

# リボテスト<sup>®</sup> 陽性コントロール レジオネラ

## 【全般的な注意】

- 定められた操作法、並びに条件以外でのご使用はお避け下さい。
- 使用説明書に記載された使用方法以外については保証いたしません。
- 本品には*Legionella pneumophila*が使用されています。製造過程で不活化処理が施されていますが、感染の可能性があるものとして十分注意して取り扱って下さい。

## 【形状・構造等(キットの構成)】

リボテスト<sup>®</sup> 陽性コントロール レジオネラ:1本 (1回用)

## 【使用目的】

本品はリボテスト<sup>®</sup> レジオネラ (ver.2)専用の陽性コントロールです。精度管理計画に使用します。

## 【用法・用量(操作方法)】

- 15～30℃に戻してから使用して下さい。
- 本品はそのまま使用して下さい。
- リボテスト<sup>®</sup> レジオネラ (ver.2)の電子添文の用法・用量(操作方法)の項目に従い、検体を陽性コントロールと読み替えて操作して下さい。
- リボテスト<sup>®</sup> レジオネラ (ver.2)の電子添文の測定結果の判定法に従い、陽性であることを確認して下さい。  
※ リボテスト<sup>®</sup> レジオネラ (ver.2)の電子添文は独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページからご確認下さい。

## 【使用上又は取扱い上の注意】

- 取り扱い上(危険防止)の注意
  - 本品を取り扱う場合には、必ず白衣、マスク、保護メガネ、手袋等を着用して下さい。
  - 転倒等により本品を漏出または飛散させた場合は、酒精綿でふき取った後、その周辺を十分に消毒して下さい。
  - 本品には防腐剤として0.1%以下のアジ化ナトリウムが含まれていますので、測定後の廃液は大量の水で希釈して排水して下さい。また、誤って飲み込んだりしないように十分注意して下さい。万一、飲み込んでしまった場合、すぐに吐き出して水でうがいをして下さい。体に異常が見られた場合、医師に相談して下さい。
- 使用上の注意
  - 本品はリボテスト<sup>®</sup> レジオネラ (ver.2)専用です。他の測定試薬では使用しないで下さい。
  - 本品は凍結を避け、貯蔵方法を厳守して保存して下さい。凍結させた場合、品質が変化して正しい結果が得られないことがあります。
  - 本品を長時間室温に放置しないで下さい。品質が変化して正しい結果が得られないことがあります。
  - 容器の破損が認められたもの、または容器内に異物が認められた場合は使用しないで下さい。
  - 本品は、開栓日に使用して下さい。開栓後、別日に使用した場合、品質が変化して正しい結果が得られないことがあります。
  - 有効期間を過ぎたものは使用しないで下さい。
  - 異なるロットを混ぜて使用しないで下さい。
  - 本品は1回のみ使用可能です。
- 廃棄上の注意
  - 本品及び検査に使用した試薬、器具等は感染の危険があるものとして、以下のいずれかの処理を行って下さい。
    - 2%グルタルアルデヒド溶液に1時間以上浸漬する。
    - 0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸漬する。
    - オートクレーブで121℃、30分以上高圧蒸気滅菌する。
  - 本品に含まれるアジ化ナトリウムが金属と反応して爆発性のアジ化金属、酸と反応して有害かつ爆発性のアジ化水素酸を発生することがありますので、廃棄の際は大量の水で流して下さい。
  - 本品及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規制に従って処理して下さい。

**【貯蔵方法、有効期間】**

1. 貯蔵方法 2～10℃
2. 有効期間 12ヶ月


**【包装】**

製品コード	品名	包装内容
45130	リボテスト <sup>®</sup> 陽性コントロール レジオネラ	1本 (1回用)

**【問い合わせ先】**

極東製薬工業株式会社 営業学部  
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-8  
電話 03(5645)5664  
FAX 03(5645)5703

RIBOTEST, リボテストは旭化成株式会社の登録商標です。

製造販売元  極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26  
本社住所 東京都中央区日本橋小舟町7-8