

極東バイタルメディア

# サブロー寒天培地

本培地は、様々な検査材料から真菌を分離・培養するのに適しています。低い pH と高濃度のブドウ糖により他の細菌の増殖を抑制します。様々な真菌が発育するのに必要な栄養を含み、また抗菌薬を含んでいないのでほとんどの真菌を発育促進させます。



*Candida albicans*  
35°C, 40 時間, 好気培養

## 培地組成 (1,000 mL 当たり)

ペプトン	10.0 g	寒天	15.0 g
ブドウ糖	40.0 g		pH 5.6±0.2

※典型的な組成を示しています。

## 製品コード

20 枚包装 (統一商品コード No. 551-05781-2)

## 有効期間

6 ヶ月

各菌種の発育像



**Candida glabrata**



**Candida tropicalis**



**Candida krusei**



**Candida parapsilosis**



**Cryptococcus neoformans**



**Trichosporon asahii**

35℃, 40 時間, 好気培養

使用上および取扱い上の注意 ※以下の注意をよく読んでからご使用ください

- 微生物の取扱いに習熟した人の指導の下に、バイオハザード対策を実施した上で使用してください。
- シャーレの破損が認められるものは使用しないでください。
- 有効期限切れの製品は使用しないでください。
- 培地の保存は必ず冷暗所（4～8℃）で、凍結ならびに乾燥しないようにしてください。
- 冷蔵庫からの頻回な出し入れは性能の劣化を招きますので、極力お避けください。
- 本培地を使用する場合は、室温に戻してからご使用ください。
- 使用済みの培地は 121℃、30 分以上高圧蒸気滅菌を行い、速やかに廃棄してください。
- 廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

お問い合わせ先

 極東製薬工業株式会社

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 7-8  
 TEL : 03-5645-5664 FAX : 03-5645-5703  
<http://www.kyokutoseiyaku.co.jp>