

類別：機械器具 5.4 医療用捲綿子

一般医療機器 一般的名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

## メディクスワブ植毛綿棒 NAO1

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な所に保管すること。

有効期間：外箱に記載【自己認証(当社データ)による】

## 【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を取り付けたものである。

## 【材質】

・綿体：ナイロン

・軸：ナイロン

## 【寸法】

・全長：約 151 mm

・綿体長：約 17 mm

・綿体径：約 3mm

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディック株式会社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

## 【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用する。

主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取用に適しています。

## 【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、綿体部分で検体を採取する。

## 【使用上の注意】

- 開封後は速やかに使用してください。
- 常温下で使用し、凍結や加熱をしないでください。
- 綿棒の軸を折らないようご注意ください。  
小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。
- 検体を直接採取する時、採取する粘膜等の部位を傷つけないよう注意してください。
- 検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。
- 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
- 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。